

Instructie CRP sneltesten (artikel nummers 56006 en 56007)

- U prikt een patiënt aan met een vingerprikker en u gebruikt de bijgeleverde capillaire om de juiste hoeveelheid bloed af te nemen;
- Dan stopt u de gehele capillair in het buisje met vloeistof, schudt daarna 10 seconden stevig;
- Nu kunt u de teststrip plaatsen en deze er voor minstens 10 seconden in laten zitten, tot er een lichtroze kleur ontstaat op de strip;
- Nu plaatst u de strip op een droge, vlakke ondergrond, waarna u deze na *exact* 5 minuten kunt aflezen.