

## Tips bij het oplossen van storing E01 t/m E05 Hemocue apparatuur 201+

### Onderhoud: gebruik hiervoor de speciale cleaner (artikelnummer 52227)

1. Controleer of de analyser is uitgeschakeld.  
Het display dient leeg te zijn.
2. Trek de cuvettehouder uit naar de laadpositie.  
Druk met een puntig voorwerp voorzichtig het palletje omlaag dat zich in de rechterbovenhoek van de cuvettehouder bevindt.
3. Houd het palletje ingedrukt en trek voorzichtig de cuvettehouder zoveel mogelijk opzij naar links. Trek voorzichtig de cuvettehouder in de richting waarin het handvat van de cuvettehouder wijst.
4. Reinig de cuvettehouder met alcohol of een mild reinigingsmiddel.
5. Plaats een HemoCue Cleaner\* in de opening van de cuvettehouder.  
5 –10 keer op en neer halen, als de cleaner vuil is deze procedure met een nieuwe cleaner herhalen. De analyser is schoon wanneer de cleaner niet meer vervuild is.
6. Wacht 15 minuten alvorens de analyser weer te gebruiken. Plaats de cuvettehouder weer terug.  
De deksel kan worden gereinigd met alcohol of een milde zeepoplossing.

