

Reinigingsprocedure Uryxxon Relax

1. Zet het apparaat aan d.m.v. de aan/uit schakelaar op de achterzijde (hierdoor komt striphouder automatisch uit het apparaat!)
2. Schakel hierna het apparaat weer uit (striphouder staat in uitgeschoven stand)
3. Trek nu de kunststof striphouder d.m.v. een lineaire beweging van de metalen ondergeleider
4. Spoel de striphouder af met water
5. Verwijder eventueel kristallijne afzettingen met een zachte borstel
6. Maak de striphouder schoon met 70% alcohol of geschikte desinfectiemiddel
7. Plaats de striphouder weer terug in het apparaat. LET OP: bij terugplaatsing van de striphouder deze ca. 1,5 cm. over metalen ondergeleider plaatsen en druk deze hierna voorzichtig volledig in het apparaat terug! *Zie ook de afbeeldingen in gebruiksaanwijzing bij hoofdstuk 10*
8. Het apparaat is nu weer klaar voor gebruik