


## CORDRING




### Gebruiksaanwijzing – Mode d'emploi

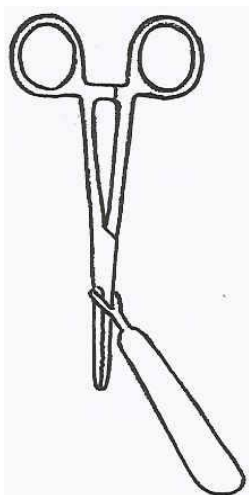


Steek de forceps door het gaatje aan de Cordring. Knijp met een andere forceps de navelstreng toe dicht bij de moeder.

Glissez le forceps à travers le trou au Cordring. Pincez le cordon ombilical près de la maman

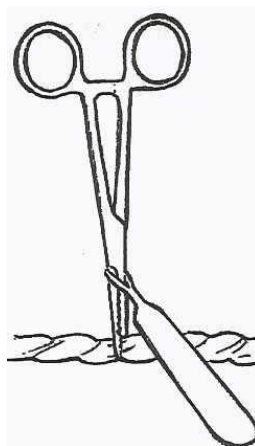


Knijp met de forceps waarrond de Cordring zit, de navelstreng toe dicht bij de baby. Zorg ervoor dat navelstreng volledig tussen de tanden van de forceps zit.

Avec le forceps qui tient le Cordring, pincez le cordon ombilical près du bébé. Assurez-vous que le cordon est pris complètement entre les dents du forceps.

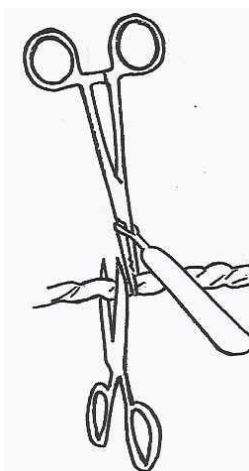


Knip de navelstreng door langs de kant van de moeder en sluit de forceps waarrond de Cordring zit.

Coupez le cordon ombilical du côté de la maman et fermez le forceps qui tient le Cordring

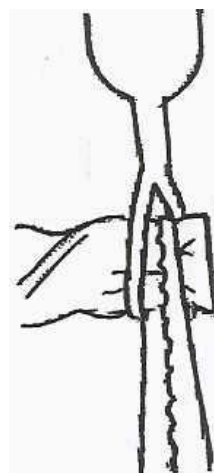


Neem de Cordring bij het vleugeltje en trek hem van de forceps en over de navelstreng.

Prenez le Cordring par l'ailette et tirez l'anneau du forceps en le glissant autour du cordon ombilical

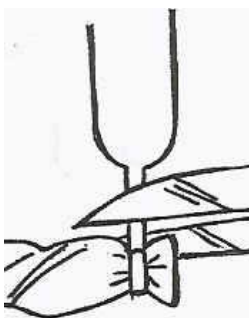

Knip het vleugeltje van de Cordring af dicht bij de navelstreng.

Découpez l'ailette du Cordring près du cordon ombilical.

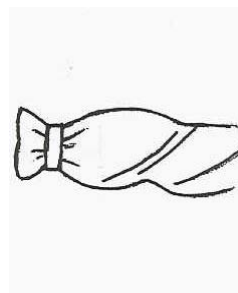

Klaar

Fini.

Verdeeld door – Distribué par:

**N.V. International Medical Products S.A.**

Terhulpesteenweg 181 Bus/Bte 21 Chaussée de la Hulpe

1170 Brussel – Bruxelles

Tel./Tél.: 02 660 50 75 Fax: 02 660 20 98

E-mail: info@intermed.be