



Gebruikersinstructie:

1. Maak de punt van het monofilament schoon met een alcoholdoekje.
2. Laat voor gebruik de patiënt de druk op arm of hand ervaren.
3. Plaats het uiteinde van het monofilament recht op de huid en verhoog de druk totdat deze buigt.
4. Houdt het monofilament gedurende 1-2 seconden gebogen op zijn plaats.
5. Vraag de patiënt haar/zijn ogen te sluiten en ja te zeggen wanneer hij/zij het monofilament voelt.
6. Voorgestelde plaatsen voor het testen worden getoond in de afbeelding.
7. De verschillende plaatsen moeten willekeurig worden getest en alle plaatsen waarop de patiënt niet reageert, moeten opnieuw worden getest.