

Installatie checklist autoclaaf + MelaDem + Breaktank



MEDIQ Medeco

Behorende bij de Melag modellen: Euroklav 23S en de 23VS

Met het invullen van deze checklist geeft u aan dat de benodigde voorzieningen aanwezig zijn, zodat uw autoclaaf probleemloos geïnstalleerd kan worden. Wij kunnen uw autoclaaf pas installeren als wij deze checklist van u terug hebben ontvangen.

Wanneer alle punten accoord en ingevuld zijn, zien wij **alle** formulieren graag ondertekend retour.

Let op: de deur van de autoclaaf draait naar links open!

WERKBLAD	Plaats de autoclaaf op een stevige ondergrond. De autoclaaf weegt +/- 60kg en moet daarom op een stevige ondergrond staan zoals een tafel of werkblad. Adviesdiepte: minimaal 60 cm.	Werkblad voldoende diep aanwezig?
	LET OP: een klaptafel of bijzettafel voldoet niet. De autoclaaf moet voldoende ruimte hebben voor koeling. Minimaal 10 cm aan beide zijkanten en 100 cm aan de bovenzijde. Afmeting autoclaaf: 50 x 45 x 72 cm (hxbxd), 60cm breed incl. Meladem	* <input type="checkbox"/>
Wij adviseren u om de autoclaaf op een goede werkhoogte te plaatsen. De plaatsingshoogte moet minimaal 50 cm zijn. Plaats de autoclaaf in een goed geventileerde ruimte. Wij raden af een autoclaaf in een douche, kast of badkamer te plaatsen.		
STROOM 3000 Watt 230 Volt	Let op: voor de autoclaaf heeft u een 230 Volt stopcontact met randaarde nodig, die op een onbelaste stroomgroep is aangesloten. De voorkeur gaat uit naar een aparte groep, i.v.m. mogelijke overbelasting van de stroomgroep (raadpleeg bij twijfel uw installateur). Gebruik absoluut geen verlengsnoer. Stopcontact niet direct achter de autoclaaf plaatsen. Snoerlengte van de autoclaaf is ± 100 cm. Hou bij de plaatsing van de autoclaaf rekening met de locatie van het stopcontact.	Stroomvoorziening onbelaste groep aanwezig? * <input type="checkbox"/>
Bij een overbelaste groep kan de zekering uitschakelen en de autoclaaf abrupt onderbreken. Hierdoor kan schade ontstaan aan de autoclaaf.		
STANDPLAATS	Waar komt de autoclaaf te staan?	* begane grond <input type="checkbox"/> * verdieping <input type="checkbox"/>

Uw paraaf ter bevestiging van dit blad:

* aanvinken

Mediq Medeco

Alexander Flemingstraat 2 | 3261 MA Oud-Beijerland | Postbus 1555 | 3260 BB Oud-Beijerland
T (0186) 63 45 00 | E cs.eerstelijns@mediq.com | pluspunt.mediqmedeco.nl

Vervolg Installatie checklist watervoorziening



MEDIQ Medeco

Behorende bij de Melag modellen: Euroklav 23S en de 23VS

De modellen kunnen ook op de waterleiding worden aangesloten voor automatische watervoorziening. Om de autoclaaf op de externe waterleiding aan te sluiten heeft u een MelaDem 40 en KIWA Breaktank nodig. Deze apparaten maken van leidingwater het benodigde demiwater. Het demiwater wordt opgeslagen in Breaktank, waar de autoclaaf het uithaalt.

Ook het verbruikte water wordt dan automatisch in de afvoer geloosd.

Onderstaande zijn van toepassing. (Let op!: er moet ruimte naast de autoclaaf zijn voor de Meladem, ± 15 cm)

Bij deze opstelling dient de watertoevoer uitgevoerd te zijn volgens de voorschriften van uw waterleidingbedrijf!

AFVOER	De autoclaaf moet het verbruikte water automatisch kunnen lozen. Hiervoor is een afvoerpijp met sifon nodig. De afvoerpijp dient direct achter de autoclaaf aanwezig te zijn zodat de afvoerslang van de autoclaaf naar beneden kan aflopen. De afvoerpijp mag niet hoger zitten dan onderkant v/d autoclaaf! Bij voorkeur zit de afvoerpijp onder het werkblad. Boven de afvoer maakt u een gat van Ø 3 cm in het werkblad. Zorg er voor dat het gat zo ver mogelijk naar achteren in het werkblad zit, zo dicht mogelijk tegen de muur aan.	Afvoer: vrije afvoer achter de autoclaaf aanwezig? * <input type="checkbox"/>
WATERKRAAN	Voor de watertoevoer is een standaard wasmachine kraan nodig. Dat is een standaard beluchte kraan met 3/4 inch uitwendige schroefdraad. De kraan moet in de buurt van de autoclaaf zitten. 20 cm ruimte onder de kraan voor montage van waterslot!! De kraan mag ook onder het werkblad zitten. Er is dan geen extra gat in het werkblad nodig omdat de slang door het zelfde gat als de afvoerslang kan. De autoclaaf installateur zorgt verder voor de installatie van de MelaDem 40 aan de kraan en aan de autoclaaf.	Vrije kraan volgens specificaties aanwezig? * <input type="checkbox"/>

* aanvinken

De benodigde voorzieningen zijn aanwezig vanaf dd:

Mediq Medeco behoudt zich het recht voor, de autoclaaf niet te installeren als dit volgens haar inschatting niet verantwoord of mogelijk is. Mediq Medeco kan in dit geval kosten voor het bezoek in rekening brengen. Alle montagewerkzaamheden worden uitgevoerd door Mediq Tefa. Mediq Tefa is de medisch technische dienst van Mediq Medeco.

Alle formulieren dienen volledig ingevuld retour te worden gezonden. Let op: wij kunnen pas een afspraak maken voor installatie zodra wij deze checklist hebben ontvangen. Mochten bovenstaande voorzieningen niet geheel mogelijk zijn, neemt u dan zo snel mogelijk direct contact op met onze verkoopadviseur.

Praktijk naam: Plaats

Straat..... Naam.....

Datum: Handtekening

Mediq Medeco

Alexander Flemingstraat 2 | 3261 MA Oud-Beijerland | Postbus 1555 | 3260 BB Oud-Beijerland
T (0186) 63 45 00 | E cs.eerstelijns@mediq.com | pluspunt.mediqmedeco.nl


Vervolg Installatie checklist watervoorziening



MEDIQ Medeco

Tekening achter-aanzicht

Euroklav 23S/23VS in combinatie met de afvoer, Meladem 40 + breaktank, Melajet, keerklep.

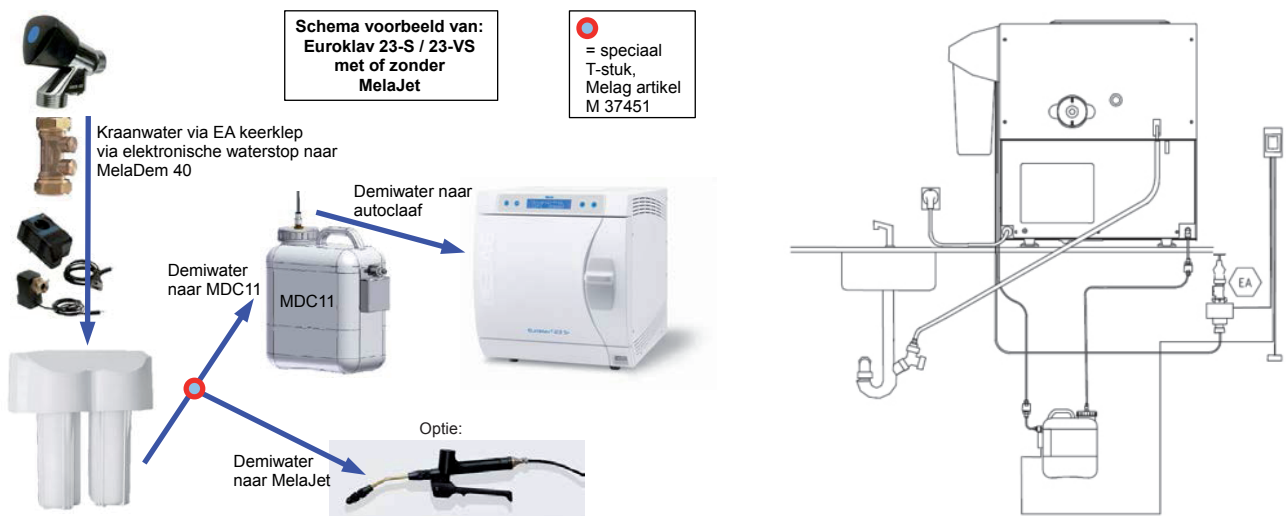

Benodigde ruimte:

Diepte / lengte:

Alle autoclaven hebben minimaal een werkblad nodig van 60 cm diep.
Dan steekt de autoclaaf een klein stukje over de rand.

Breedte:

Totale breedte zonder watervoorziening: minimaal 65 cm.
De autoclaaf is 45 cm breed + 10 cm links en rechts i.v.m. ventilatie.
Breedte inclusief watervoorziening verbonden aan autoclaaf: minimaal 75 cm.

Hoogte:

Geadviseerde minimale beschikbare hoogte: 150 cm
Hoogte autoclaaf: 50 cm + 100 cm extra ruimte i.v.m. stoomafvoer.

LET OP, zonder ruimte voor stoomafvoer boven de autoclaaf kan uw meubilair door de stoom en condensatie aangetast worden.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over de hierboven beschreven instructies, neem dan contact met ons op.

Mediq Medeco

Alexander Flemingstraat 2 | 3261 MA Oud-Beijerland | Postbus 1555 | 3260 BB Oud-Beijerland
T (0186) 63 45 00 | E cs.eerstelijns@mediq.com | pluspunt.mediqmedeco.nl