

Genius™ 3 Tympane Thermometer

Gebruikshandleiding


CardinalHealth
Essential to care™

Temperatuur nemen



Controleer het oorkanaal van de patiënt om je te verzekeren van een goede plaatsing van de thermometer. (geen bloed, vloeistof of cerumenprop mag aanwezig zijn.)



Haal de thermometer uit de basis unit.



Controleer de lens van de thermometer. Deze moet glanzend zijn en vrij van barsten of vuil en zonder sondekapje. (Reinig indien nodig de lens met een droog pluizenloos wattenstaafje of doekje)



Bevestig een sondekapje door de lens in één van de sondekapjes in de base unit te drukken tot je een klikgeluid hoort en vervolgens een slag te draaien. Controleer de buitenkant van het sondekapje. Als deze een gaatje of een scheur vertoont, gooi deze dan weg en plaats een nieuwe.



Controleer zorgvuldig dat het sondekapje goed is vastgemaakt aan de thermometer. Er MOET een sondekapje worden gebruikt.



Plaats de thermometer met het sondekapje in het oorkanaal en zorg ervoor dat de punt gealigneerd is met de ingang van het oorkanaal van de patiënt. Druk onmiddellijk op de grote driehoekige knop in het midden van het toestel. Wanneer de scan is afgerond, zal een drievoudig biepgeluid te horen zijn.



Druk op de eject-knop om het sondekapje los te schieten in een daarvoor bestemde container.



Plaats de thermometer weer in de base unit om deze op te bergen. Het LCD-scherm zal overgaan op de slaapmodus na 10 seconden inactiviteit.



Om de laatst genomen temperatuur terug te roepen, druk op de scanknop en laat deze weer los alvorens het laden van een nieuw sondekapje. Het laden van een nieuw sondekapje zal de laatst genomen temperatuur uit het geheugen wissen.

Optionele functies

Gebruik ALLEEN de goedgekeurde reinigingsmethoden beschreven in de gebruikshandleiding (IFU)..



Om het temperatuurscherm te veranderen, druk en houd de C°/F°-knop gedurende 2 seconden ingedrukt wanneer het LCD-scherm actief is. Raadpleeg de gebruikershandleiding en de biomedische dienst om de C° mode als default in te stellen.



Om de pulse timer te activeren, houd gedurende 2 seconden de knop met het klokicoon ingedrukt. In het scherm wordt 00 weergegeven.



Druk nogmaals op de tijdsknop om de timer te starten. U hoort piepjes om de 15 seconden. Wanneer u op de tijdsknop drukt tijdens het gebruik van de timer stopt de timer.