



PeeSpot INCO Pad gebruiksinstructie.

1. Draag bij contact met het vilt altijd handschoenen.
2. Haal de pad uit het plastic gripzakje en verwijder het schutblad.
3. Plaats het vilt zodanig in het inco-materiaal dat het niet kan schuren of drukken op de huid tijdens liggen en/of zitten. Dit om eventuele schade aan de huid te voorkomen.
4. Check na 2 uur (of eerder als er aanwijzing is voor urineproductie) of het vilt urine bevat. Als na 2 uur het vilt nog droog is, kan deze blijven liggen. Controleer dan na 2 uur opnieuw, etc.
5. Als het vilt urine bevat dan het vilt verwijderen en in het plastic gripzakje bewaren. Als het inco-materiaal opnieuw wordt gebruikt dan wel eerst de pad verwijderen.
6. Het vilt mag geen (sporen van) ontlasting bevatten. In dat geval opnieuw urine verzamelen.
7. De natte vilt mag in het goed afgesloten gripzakje 4 uur bij kamertemperatuur of 24 uur in de koelkast bewaard worden voordat de striptest wordt uitgevoerd.
8. Het uitvoeren van de striptest: leg het natte vilt op het plastic gripzakje en leg hier een teststrip bovenop met de testvlakjes naar beneden. Wrijf hier drie keer overheen (niet hard drukken) en controleer of de vlakjes homogeen vochtig zijn. Wacht totdat de teststrip kan worden afgelezen (meestal na 30 seconden; zie bijsluiter van de teststrip)

Hessels+Grob bv,
www.hesselsgrob.com

Versie 5, februari 2017