

27 juli 2018

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en schimmels op afwasbare oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen van de gezondheidszorg en de voedingsindustrie.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

Bacillol AF Tissues zijn alcoholhoudende desinfectiedoekjes voor desinfectie van afwasbare oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen van de gezondheidszorg en de voedingsindustrie.

Toepassing:

Neem de oppervlakken zorgvuldig af. Let op dat de oppervlakken volledig worden bevochtigd en dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven om een optimale desinfectie te waarborgen.

Minimale inwerktijd:

- 30 seconden voor bacteriën, mycobacteriën en gisten
- 1 minuut voor schimmels

Te desinfecteren oppervlak: ca. 1 m² per tissue.

Niet gebruiken op materiaal dat gevoelig is voor alcohol (b.v. plexiglas). Eventueel de bestendigheid van het materiaal testen op een onopvallende plek.

Contact met eet- en drinkwaren vermijden totdat het gedesinfecteerde oppervlak volledig droog is. Niet geschikt voor reiniging van de huid. Tissues na gebruik met het vaste afval afvoeren.